

The logo for SANA VITA, with 'SANA' in a smaller font above 'VITA'.

# Collirio

---

## +day

MONODOSE

## ISTRUZIONI PER L'USO DI SANAVITA COLLIRIO +DAY MONODOSE

### COMPOSIZIONE

Soluzione acquosa sterile di cloruro di sodio, acido bórico, borato di sodio, edetato disodico e ialuronato di sodio allo 0,1%.

### A COSA SERVE SANAVITA COLLIRIO +DAY monodose

*Sanavita Collirio +day monodose* è un dispositivo medico senza conservanti costituito da gocce oftalmiche in formato monodose. Può essere utilizzato per alleviare i sintomi di irritazione, secchezza e affaticamento oculare in pazienti di tutte le età. La formula contiene ialuronato di sodio, un componente naturale del film lacrimale che forma uno strato protettivo, è in grado di assorbire grandi quantità di acqua ed è resistente all'evaporazione. *Sanavita Collirio +day monodose* consente di stabilizzare la barriera della superficie oculare e il film lacrimale, che proteggono le cellule epiteliali della cornea da possibili danni. Inoltre, in questo modo viene stimolata la migrazione epiteliale, si riduce l'attrito tra la cornea e le palpebre durante i movimenti extraoculari e il battito delle ciglia, migliorando così la qualità ottica dell'immagine retinica. *Sanavita Collirio +day monodose* facilita l'uso delle lenti a contatto perché aumenta la lubrificazione e l'idratazione degli occhi e delle lenti, quindi migliora il comfort visivo evitando secchezza e irritazione.

### COME USARE SANAVITA COLLIRIO +DAY Monodose

*Sanavita Collirio +day monodose* è destinato alla vendita come prodotto da banco. *Sanavita Collirio +day monodose* può essere utilizzato tutte le volte che è necessario.

### Istruzioni per l'uso

Lavarsi le mani prima di separare una monodose del prodotto. Tenendo la monodose in posizione verticale, aprirla ruotando la parte superiore e assicurarsi che non entri in contatto con nessuna superficie. Capovolgere la monodose e tenerla in posizione verticale, picchiettandola leggermente fino a quando la soluzione non è scesa completamente.

#### • **Uso diretto sulla superficie oculare:**

Tirare delicatamente la palpebra inferiore verso il basso e guardare verso l'alto, quindi esercitare una lieve pressione sulla monodose evitando di toccare l'estremità aperta e somministrare una o due gocce di *Sanavita Collirio +day monodose* nel sacco congiuntivale (lo spazio tra l'occhio e la palpebra).

Dopo aver instillato le gocce rilasciare la palpebra inferiore, quindi sbattere le ciglia più volte.

#### • **Per l'uso con le lenti a contatto:**

Applicare una o due gocce sulla superficie interna della lente prima di posizionarla nell'occhio.

### CONTROINDICAZIONI

- Non utilizzare insieme ad altri prodotti senza prima consultare il medico.
- Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno qualsiasi dei suoi ingredienti.
- Non utilizzare su ferite aperte o in prossimità di ferite aperte, poiché il prodotto potrebbe causare prurito, irritazione o sensazione di bruciore.


















## EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI

Come tutti i dispositivi medici composti da sostanze o combinazioni di sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano e assorbite o disperse localmente nel corpo, **Sanavita Collirio +day monodose** può causare effetti collaterali, sebbene non tutte le persone li manifestino. I possibili effetti collaterali di questo dispositivo medico includono la sensazione di un corpo estraneo e dolore, prurito o irritazione nell'occhio.

Qualora si verificano effetti avversi gravi a seguito dell'utilizzo del dispositivo, è necessario segnalarli al fabbricante, al distributore locale e all'autorità competente nazionale.

## AVVERTENZE O PRECAUZIONI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è privo di conservanti. Dopo aver aperto la fiala monodose, utilizzare immediatamente e smaltire dopo l'uso per evitare il rischio di contaminazione, che potrebbe causare un'infezione.
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare se la monodose è danneggiata o se viene aperta accidentalmente prima dell'uso.
- Non conservare a temperature superiori a 25 °C.
- Ciascuna monodose può essere utilizzata per una sola persona.
- Non iniettabile.
- **Sanavita Collirio +day monodose** contiene una quantità di acido bórico sicura se utilizzata secondo le istruzioni riportate sull'etichetta.

Legenda dei simboli			
	Fabbricante		Data di scadenza
	Data di fabbricazione		Sito web informazioni paziente
	Distributore		Dispositivo medico
	Sterilizzato utilizzando tecniche di fabbricazione asettiche		Identificatore univoco del dispositivo
	Sistema singolo di barriera sterile		Paese di fabbricazione: Spagna
	Non riutilizzare		Non conservare a temperature superiori a 25 °C
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata		Contiene sostanze pericolose
	Codice lotto		Consultare le istruzioni per l'uso
			0318 Marcatura CE dell'organismo notificato 0318



UNOLAB MANUFACTURING, S.L.  
Avenida Rita Levi-Montalcini N° 23,  
Getafe, 28906 (Madrid), Spagna  
www.unolab.es



PALADIN  
PHARMA

Paladin Pharma S.p.A.  
Via Vincenzo Monti 12A - 10126 Torino

Rev 2022/01/10

300758